


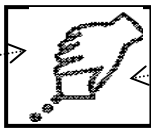
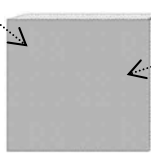


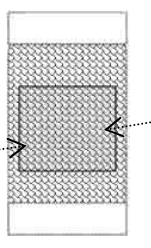
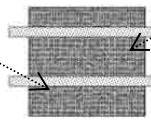
ערכת עזרה ראשונה לטיפול בכוויה FIRST AID BURN DRESSING PACK

מיועדת לטיפול מידי בכוויה מדרגה 1 או 2 לגודל כוויה עד 12X12 ס"מ

For First Aid treatment of 1st and 2nd degree burns up to size 12 X 12 cm

Note: Components are packed in the exact order of use.

שים לב: המוצרים מונחים באריזה לפי סדר השימוש

<p>1. If possible, remove the cause of the burn.</p> <p>2. Tear open the bag containing sterile water at the slit indicated on the bag (Scissors are not required). Pour the sterile water over the burn/wound.</p> <p>3. With the silver surface facing towards the wound, cover the wound with the antiseptic dressing pad. (Silver ions in the pad material assist in preventing development of micro-organisms in the wound – <i>it is recommended that the dressing be changed within 24 hours</i>).</p> <p>4. Using both hands, squeeze the FLEXXUM bag firmly until the inner bag bursts to activate its contents. Shake bag well until contents feel "cold". Place the "cold" pack on the pad (Immediate cooling of the burn is very important). <i>After use, fluid contents can be used as plant fertilizer.</i></p> <p>5. Unfold the Gauze/Cotton-wool dressing pad & cover the cold pack with the blue surface facing upwards.</p> <p>6. On arms/legs, use the tubular elastic netting bandage to secure the dressings. On other body parts, secure the dressings by means of adhesive tapes provided.</p> <p>7. The dressing should be kept on the wound for at least one hour.</p> <p>8. It is important to ensure that the Silver Pad remains attached to the burn throughout the healing process.</p> <p>9. Seek medical attention, or re-dress the wound with burn dressings, as applicable.</p> <p>MADE IN ISRAEL BY: Pollak (Intl.) Ltd. 20 HAMLACHA STREET, Rosh Ha'ayin, Il 48091 Tel: 972 3 9022885 Fax: 972 3 9024531</p>	      	<p>1. סלק את הגורם לכוויה מהכוויה.</p> <p>2. פתח את השקית, המלאה מים סטריליים, ע"י קריעתה במקום המסומן על השקית (בשקית יש חריץ לתחילת הפתיחה - אין צורך במספרים) - שפוך את המים על הכוויה.</p> <p>3. הנח את הפד האנטיספטי כשצדו הכסוף פונה אל הכוויה. הצד הכסוף חייב לגעת בכוויה. (תפקידם של יוני הכסף למנוע התפתחות מיקרואורגניזם בכוויה - מומלץ להחליף את הפד תוך 24 שעות מהווצרות הכוויה).</p> <p>4. עוות וסובב את השקית המסומנת FLEXXUM, בשתי הידיים עד שתרגיש שהשקית הפנימית נקרעה, נער היטב עד שתחוש שהשקית הופכת לשקית קרה. הנח את השקית הקרה על גבי הפד למטרת קרור הכוויה. (קרור מידי של הכוויה חשוב מאד). לאחר השימוש, ניתן להשתמש בתכולת השקית לדישון עציצים.</p> <p>5. פרוס את הפד מצמר גפן העטוף בגזה והנח אותו על השקית הקרה כאשר הצבע הכחול למעלה.</p> <p>6. אם הכוויה בגפיים, חבוש באמצעות הרשת האלסטית. אם הכוויה במקום אחר בגוף, הצמד את פד הצמ"ג לכוויה באמצעות האינספלניות.</p> <p>7. השאר את החבישה לפחות שעה על גבי הכוויה.</p> <p>8. חשוב, שפד הכסף, יהיה צמוד לכוויה לאורך כל תהליך הריפוי.</p> <p>9. פנה לקבלת טפול רפואי מתאים, או חבוש את המקום באמצעות ערכה לחבישת כוויה.</p> <p>יצרן: פולק (אינטרנשיונל) בע"מ המלאכה 20 ראש העין 48091 טל: 03-902 2885 פקס: 03-902 4531 www.euroband.com Pollak@euroband.com</p>
---	--	--